

Artikel-Nr.: 2VT002
Größe* (LxB): 50 x 60 cm
Gewicht: 500 g
Anschlüsse: 2
Material: 98%PES/1%PU
Tierarten: Kleine Hunde
Katzen
Kaninchen
Nagetiere etc.



Produktbeschreibung

Wiederverwendbare konvektive Wärmeunterlage zur Patiententemperierung von unten. Wirkt druckentlastend und ermöglicht dem Anwender optimalen Zugriff auf den Patienten.

Anwendung

- Wärmeunterlage mit der **weißen Seite** auf dem OP-Tisch platzieren
- Schlauchende des Warmluftgerätes in eine der Anschlussöffnungen der Wärmeunterlage 10cm hinter den Klettverschluss schieben und den Schlauch mit den Klettverschlüssen fixieren
- Patient auf der **grünen Seite** (= Patientenseite) der Wärmeunterlage positionieren
- Warmluftgerät gemäß Gebrauchsanweisung anschalten und betreiben
- **Hinweis:** Nur Warmluftgeräte verwenden, die für die konvektive Patientenerwärmung zugelassen sind. Beste Ergebnisse werden in Kombination mit unserem Warmluftgerät **Twinwarm BB** erzielt



Achtung!

Um einen gleichmäßigen Warmluftfluss zu gewährleisten und eine thermische Schädigung zu vermeiden, dürfen keine Folien o.Ä zwischen Patientenhaut und Wärmeunterlage appliziert werden. Die Wärmeunterlage darf nur für veterinäre Patienten verwendet werden. Wir empfehlen, wenn möglich, den Patienten bereits vor OP-Beginn zu wärmen.

Reinigung / Entsorgung

- Die Wärmeunterlage ist bis max. 70° waschbar
 - Die Wärmeunterlage ist im Wäschetrockner bei höheren Temperaturen trockenbar
 - **Wichtig!** Sofort aus dem Trockner nehmen, um Knitterfalten zu vermeiden
- Wir empfehlen eine hängende Lufttrocknung über Nacht
- Die Entsorgung defekter Wärmeunterlagen erfolgt über den Hausmüll/Restmüll



Schonend bei max.70° waschen



Im Wäschetrockner bei höheren Temperaturen trockenbar



Nicht bügeln



Schonend reinigen mit Perchlorethylen



Bleichen nur mit Sauerstoff

*Die textilen Produkte laufen während den ersten Aufbereitungszyklen um 3-5% ein, Maßangaben +/- 2cm